



CLICKSTAR


SNABBGUIDE

ClikSTAR och dess delar

Du har just blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) eller Apidra (insulin glulisin) i flergångsinsulinpennan ClikStar.

I snabbguiden hittar du information om hur du använder din ClikStar. Mer utförlig information finner du i den bruksanvisning som följer med ClikStarförpackningen.

Du kan även ringa 020-52 68 87 hela dygnet 7 dagar i veckan och få svar på dina frågor om sanofi-aventis insulinpennor.

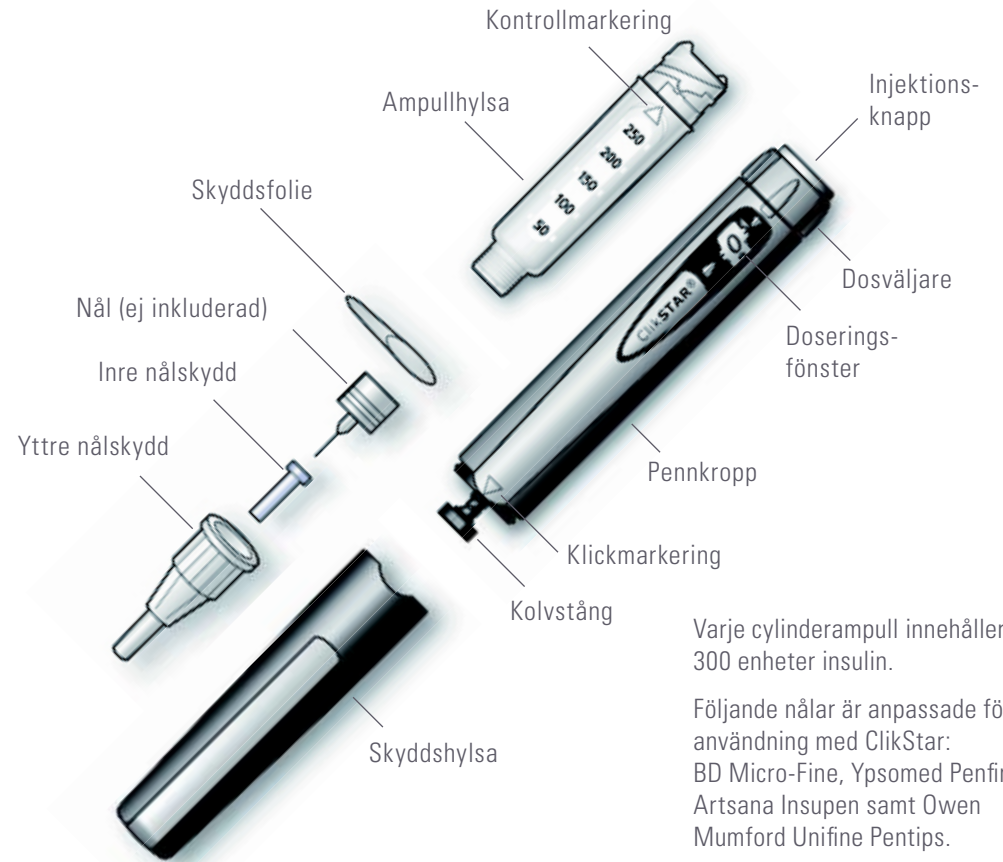


Varje cylinderampull innehåller 300 enheter insulin.

Följande nålar är anpassade för användning med ClikStar:
BD Micro-Fine, Ypsomed Penfine, Artsana Insupen samt Owen Mumford Unifine Pentips.


Senaste uppdatering över godkända nålar och mer information finns på www.insulin.se

Så här börjar du


1 Tag av skyddshylsan. Skruva loss ampullhylsan från pennkroppen. Sätt i en ny cylinderampull i ampullhylsan.

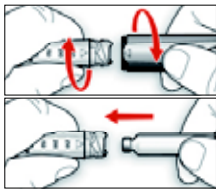


2 Tryck in kolvstången rakt med hjälp av ampullhylsan. Du kan även trycka in kolvstången med fingret.

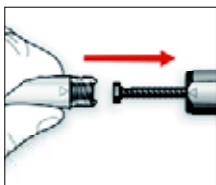

3 Skruva tillbaka ampullhylsan på pennkroppen tills den "klickar" fast och markeringarna pekar mot varandra.

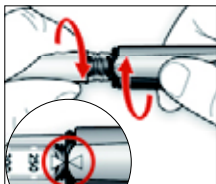


4 Sätt på en nål rakt på penna. Skruva eller tryck på nålen beroende på vilken nål du använder.

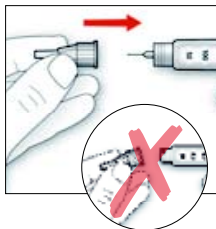


Gör ett säkerhetstest inför varje injektion


5 Välj dosen 2 enheter genom att vrida dosväljaren. Tag av yttre och inre nålskyddet.

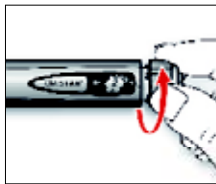

6 Håll penna med nålen uppåt. Tag bort eventuella luftbubblor genom att knäppa med fingret på insulinbehållaren.

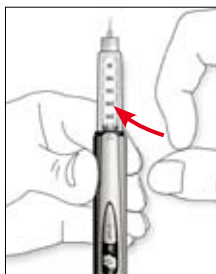


7 Tryck in injektionsknappen hela vägen in. Kontrollera att insulin kommer ur nålspetsen och att dosfönstret visar "0".

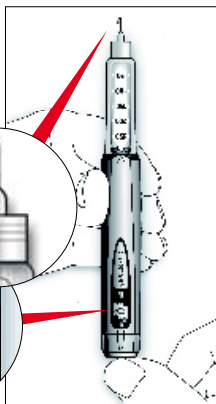


Ställ in dosen och injicera


1 Ställ in den önskade dosen. Vrider du förbi den enhet du skall injicera, är det bara att vrida tillbaka till rätt enhet.

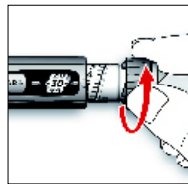

2 Injicera din dos så som din diabetes-sköterska eller läkare har lärt dig. Stick in nålen i huden och tryck in injektionsknappen ända ner till botten. Under tiden du injicerar räknar dosfönstret ner till "0".


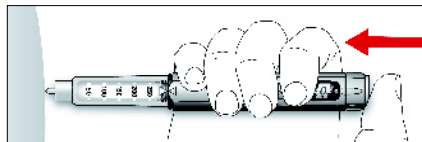


3 Håll kvar trycket på injektionsknappen i nedtryckt läge medan du räknar till 10. Drag därefter ur nålen.

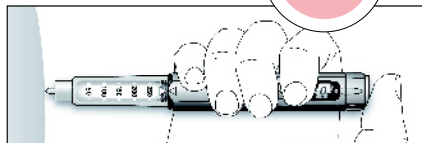

Efter att du injicerat

4 Sätt på det yttre nålskyddet och skruva av nålen. Kasta nålen som du har blivit anvisad. Sätt på skyddslocket på din KlikStar och förvara den säkert.

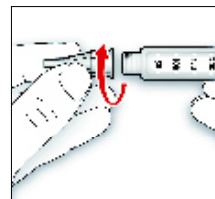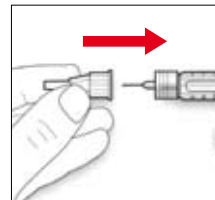

OBS!

Avlägsna alltid nålen efter en injektion och förvara KlikStar utan nål. Detta hjälper till att förebygga nedsmutsning, luftbubblor och insulinläckage.

Frågor om våra insulinpennor: 020-52 68 87

Mer information om diabetes hittar du på www.insulin.se

Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

sanofi-aventis AB, Tel: 08 - 634 50 00. www.sanofi-aventis.se
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi-aventis.com
Clikstar är CE-märkt.

sanofi aventis
Because health matters